


Пожалуйста, убедитесь, что у вас включен GPS на телефоне и разрешено местоположение для Polar Beat и Polar Equine. В связи с требованиями Google о разрешении синхронизации по Bluetooth, вы должны включить службы определения местоположения, чтобы использовать датчик Polar в приложении Beat. Android 6.0 и более поздние версии требуют, чтобы приложения запрашивали разрешение, прежде чем приложение сможет использовать системные данные и функции. Разрешение на местоположение требуется не только для отслеживания маршрутов GPS, но и для поиска устройств Bluetooth.

ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА СЕРДЕЧНОГО РИТМА С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR EQUINE

1. Откройте приложение Polar Equine на вашем Android-устройстве.

2. На главном экране перейдите в  > Список устройств .

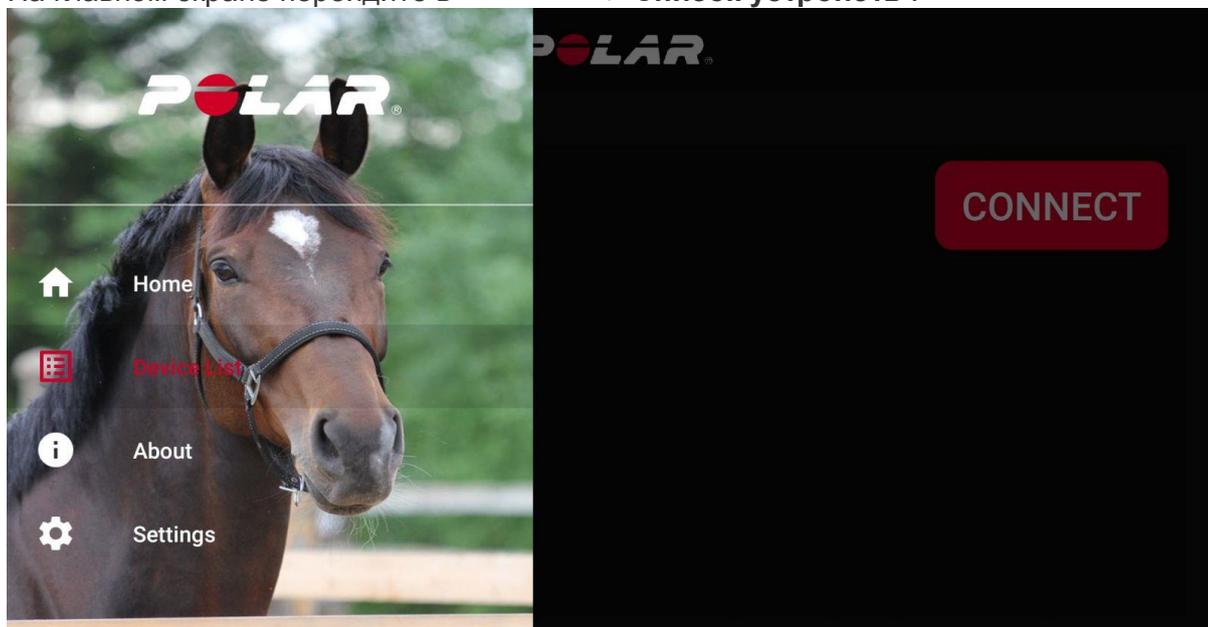

3. Приложение автоматически начнет поиск сигнала датчика.
4. Активируйте датчик сердечного ритма, коснувшись металлических защелок, которые крепят датчик к ручке.

5. Как только датчик сердечного ритма найден, на дисплее появляется Polar H10 ID: xxxxxxxx.



6. Нажмите CONNECT для сопряжения датчика.


ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА СЕРДЕЧНОГО РИТМА С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR EQUINE:

1. Откройте приложение Polar Beat на вашем Android-устройстве.

2. Перейдите в    > **Настройки** > **Датчик ЧСС** . Соедините датчик.

Settings

User

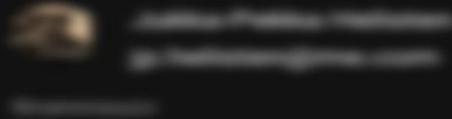

General

Units

Metric

HR sensor

Not paired

Voice guidance



Google Fit



Share

Facebook



Twitter



Details

About

← HR sensor

Searching...




Polar H7
ID:2D2C2816

PAIR

Make sure that you are wearing the sensor correctly and that you have moistened the electrodes.



1. Тщательно увлажните шерсть лошади в зоне измерения сердечного ритма. Также смочите участки пластикового электрода на обратной стороне измерителя. Для оптимизации контакта кожи лошади с электродами на электродах можно использовать контактный гель.

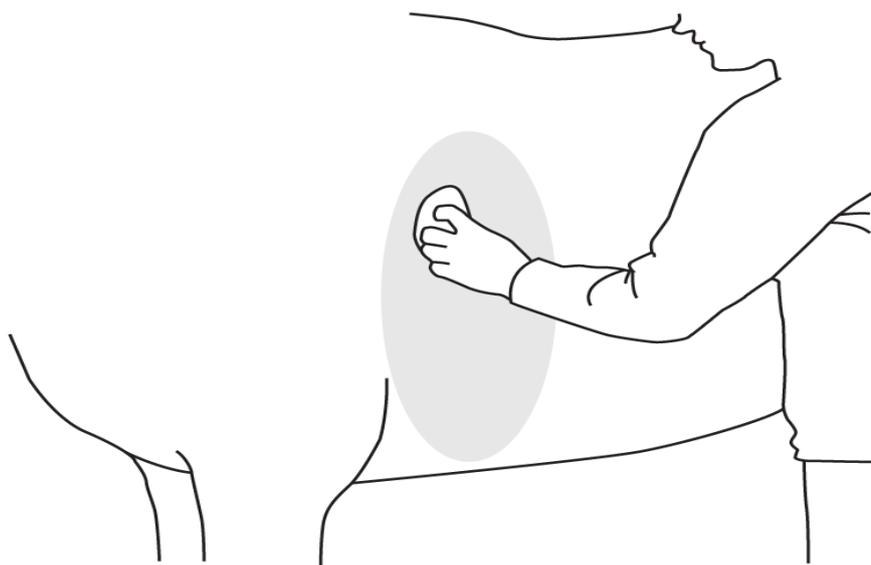

2. Прижмите Polar Equine Healthcheck к лошади. Наблюдайте результат на экране вашего смартфона

